



Cómo aplicar el colirio VisuXL®*


Si utiliza varios colirios, aplíquese el VisuXL como mínimo cinco minutos antes o después de la administración de los demás medicamentos siguiendo las instrucciones indicadas a continuación:

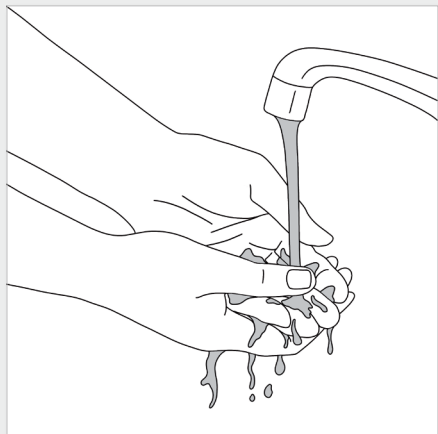


1. Lávese las manos antes de aplicarse el producto

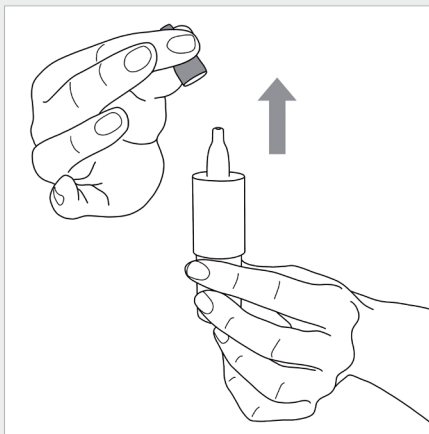


2. Saque el tapón

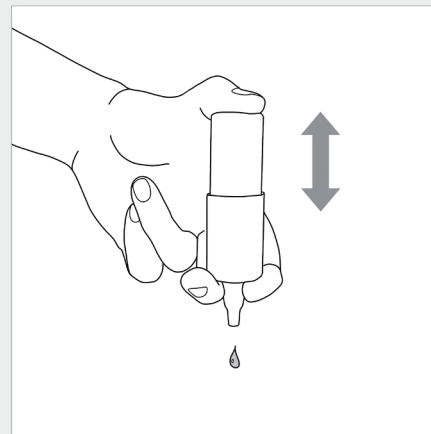


3. Prepare el producto sujetándolo boca abajo y bombee el envase varias veces hasta que salga una gota

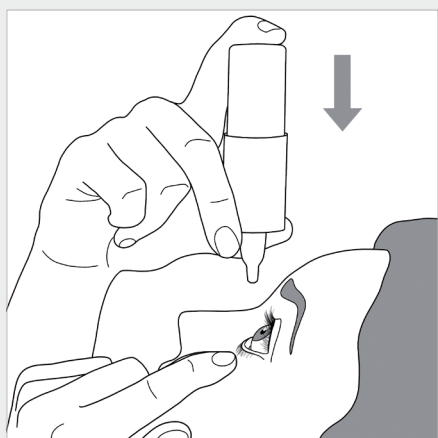

4. Baje suavemente el párpado inferior, mire hacia arriba y deposite una gota en la bolsa que se forma en el párpado inferior. Aplique el producto con un único bombeo presionando el tapón dispensador.

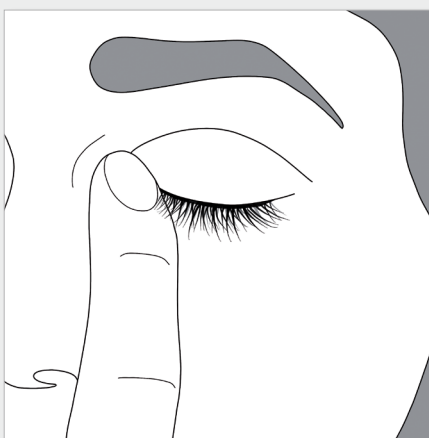

5. Mantenga suavemente presionada con el dedo la esquina interna del ojo después de aplicarse la(s) gota(s) durante al menos un minuto.

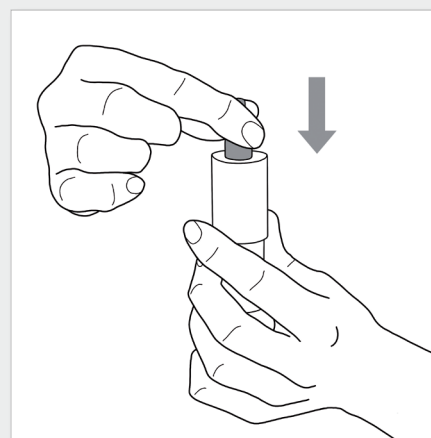

6. Tras el uso, cierre inmediatamente el envase. La solución puede utilizarse durante los 2 meses siguientes a la apertura del envase.

Contacto:
info@VISUfarma.com

* Información complementaria para el VisuXL IFU 09/2017
Fecha de preparación: Mayo de 2018

VisuXL®
Premium dry eye relief and recovery